

おむつ交換のタイミングを
スマホにお知らせ!



介護用 おむつセンサー

Adult
SmartDiaper



介護用おむつセンサーとは



おむつセンサーは、要介護者の方が履くおむつにセンサーを付けることで温度と湿度を感知し、排尿をスマートフォンに通知する便利アイテムです。

おむつセンサーの特徴



要介護者の健康管理

おむつを交換した時間や一日の排尿の回数を記録できます。記録したデータはアプリで確認ができますので体調管理に役立ちます。データはクラウド上に保存されるので、複数人でのデータの共有が可能です。

スマートフォン1台で複数のセンサーに接続可能

1台のスマートフォンで最大4台までのおむつセンサーと同時接続が可能です。介護施設での利用など複数人を同時におむつの管理をすることができます。

使い心地のよい素材

おむつセンサー装着の負担をなくすために、薄くて通気性のあるシリコンカバーを採用。シリコン素材なので柔らかく水洗いが可能です。お手入れの際は、内側のプラスチック製センサーを取り出してください。

徘徊を防止する見守り機能

スマートフォンがおむつセンサーから離れるとアラームが鳴るので徘徊を防ぐことができます。(約30m離れるとアプリに通知します)



要介護者が履くおむつにセンサーを取り付けることで、おむつの温度と湿度を測定します。温度と湿度をもとに、おむつの状態を4段階で識別しアプリの画面に表示。レベル4に達するとアプリはアラームを発してお知らせをします。おむつの交換回数やアラームの通知時間をクラウドで管理しているので、異なる空間で共有することができます。

製品仕様

ネットワーク	Bluetooth 4.0
電源	DC 3V
リチウム電池容量	210mAh
リチウム電池種類	CR2032 リチウムバッテリー
作動距離	30m
主な材料	ABS シリコン
サポートバージョン	iOS 8.0 以上 Android 4.3 以上
認証	FCC CE NCC TELEC SRRC SAR RoHS
連続使用時間	約5ヶ月
セット内容	シリコン製カバー(大・小)・リチウム電池 センサー装置・電池用ストッパー・電池交換金具



アプリは「adult smartdiaper」で検索してください。QRコードからでもダウンロードいただけます。



お問い合わせ

 朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196
E-Mail medical@asahi-sg.co.jp <http://www.asahi-sg.co.jp/>

 iQ Labo

株式会社アイキューラボ
<http://www.iqlabo.com>