



私は安心、どこへでも。
Mr. ユリナーがあるから。

★身体に付けない収尿器★

Mr. ユリナー®

特許第4758516号／意匠登録出願済


ズボンの中に、こっそりトイレ!

ズボンのファスナー開口部から「Mr. ユリナー」を入れて、
2箇所のクリップを衣服の内側に固定するだけで装着完了。
服を着たままでも、簡単な手順で、ご自身で簡単に脱着ができます。


体に直接取り付けないので、
ペニスや皮膚に負担を与えません!

「装着の仕方」


1 ズボンの開口部から
中に挿入れます

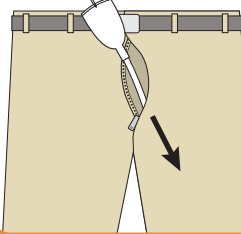

2 上部クリップをズボンの
内側で布地に挟んで止めます

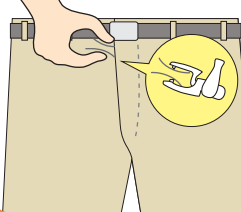

3 下部クリップをズボンの
ひざ辺りで布地に挟んで止めます

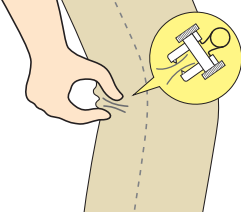

肌に優しい
柔らかシリコン製



ワンタッチ着脱の
軽量収尿ボトル



ふくらはぎに快適フィット、
ズボンの外から判らない
3D設計の収尿ボトル。
(ボトルは 250cc・350ccのセット
場面に応じてお使い下さい)

ムレない

快適


軽い

装着時の位置イメージ
※ズボンの内部に装着しますので、
外からは見えません。

強力クリップが
衣類をしっかり挟む



① 上クリップ

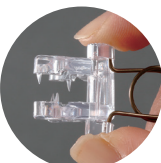

② 下クリップ

装着に気づかれず、外出が安心して楽しくなる。
トイレが心配な男性の強い味方!



安定感を高める「専用ガーター」と
「専用サポーター」付きのセットモデル

Mr. ユリナーは
立位と座位で
ご使用できます



朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd

医療機器事業部

■ 意匠登録 米国(US):No.29/531,092
日本(JP):1530263
欧州(EU):002675058-0001
■ 商標登録 日本(JP):5789413
欧州(EU):1259233



紙おむつ・尿とりパッドの嫌いな方に!
コンドーム式や袋固定式のストレスを解放!

装着簡単! 経済的!
「こんな便利な収尿器を待っていた!」



様々なシーンで役に立つ、心強い便利な味方!



ショッピング



ウォーキング



バス、電車、車



行楽、レジャー

1 排尿後の不快感ゼロ!

排尿後の温感や冷感、かゆみがほとんどありません。また、長時間の密着による蒸れ、ベルト等の締め付けの物理的ストレスが無く、装着していることさえ忘れてしまうほどの心地良さ。もちろん皮膚トラブルも極めて微小。

2 経済的負担を大幅軽減!

洗浄して何度も使用するタイプなので、恒常的に必要となる消耗品の経済的負担を大幅に軽減します。さらに、紙おむつのゴミ処分からも解放されます。

3 介護者の負担を軽減!

排尿後はボトルをワンタッチで外して尿を捨てるだけ。洗浄はボトルに洗浄液を入れ、軽く握るだけで内部全体を洗うことができるので、手間がかかりません。


4 独創的なアイデアと工夫がいっぱいのまごころ設計!



ペニスに優しい
柔らかいシリコン材で、装着感と通気性を極めた二重カップ構造のレシーバ部分。



取り扱いが簡単
シンプルな一体構造なので誰でも簡単に使えます。洗浄時も、収尿タンクをワンタッチで脱着。

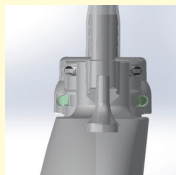

逆流防止構造
チューブとノズルは特殊な設計の二重構造。万一器具を倒しても尿が逆流しにくい安心設計。

クリップの取付位置は?

下着、ズボン、上着(肌着)など、ご使用の状況に合わせてお好きな位置にとめてください。

臥位での使用は、できますか?

Mr. ユリナーは、立位または座位用です。座位でも重力を利用した構造上、チューブがペニスより上となる使い方(逆さ)はできません。

交換の目安は?

チューブの硬化・劣化が交換の目安です。劣化は漏れの原因となります。小まめに洗浄、清潔を保つことで長くご使用いただけます。

洗浄の頻度はどれくらいですか?

不衛生は感染症のリスクが高まるため、外出先では排尿の都度の洗浄をお勧めいたします。

長期間使用しないときは?


取扱い説明書に従って、洗浄・乾燥させたのち、高温多湿は避け清潔な場所でチューブが折れ曲がらないようにして、保管してください。

収尿ボトルは、
250ccと350ccの
2個セットです



コンパクトです!

小さく丸められますから
バッグやポーチに入れて
持ち歩けます。必要な時、
サッと使えます。

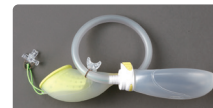

サイズの目安

S サイズ

- ・股下 ～72cm まで
- ・目安身長 ～160cm まで
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時/ 55cm
350ml ボトル装着時/ 56,5cm

M サイズ

- ・股下 72～77cm
- ・目安身長 160～170cm
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時/ 60cm
350ml ボトル装着時/ 61,5cm

L サイズ

- ・股下 77cm ～
- ・目安身長 170cm ～
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時/ 65cm
350ml ボトル装着時/ 66,5cm



Mr. ユリナー は、洗浄して繰り返し使用します
身長に応じた3種類のチューブ丈があります

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
1-11-22, Yonban, Atsuta-ku, Nagoya-city, Aichi-pref. Japan
<http://www.asahi-sg.co.jp/>

●お問い合わせ