

★排泄の自立を応援する★

ミスター

Mr. ユリナー®

特許第4758516号／意匠登録出願済

私は安心、どこへでも。
Mr. ユリナーがあるから。

トイレのトラブルで
困った本人自身が、独創的な発想と
コンセプトで考案し開発した
簡単・快適な収尿器。

世界初!!

ズボンの中に、こっそりトイレ!

ズボンのファスナー開口部から「Mr. ユリナー」を入れて、
2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。

[装着の仕方]



体に直接取り付けないので、
ペニスや皮膚に負担を与えません!



Mr. ユリナーは
立位と座位で
ご使用できます



※ 実際はズボンの中に装着しますので、外から見えません

トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心して楽しくなる!

■ 意匠登録 米国(US):No.29/531,092
日本(JP):1530263
欧州(EU):002675058-0001

■ 商標登録 日本(JP):5789413
欧州(EU):1259233



朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196

E-Mail medical@asahi-sg.co.jp http://www.asahi-sg.co.jp/



特許第4758516号／意匠登録出願済

装着簡単！ 経済的！

「こんな便利な収尿器を待っていた！」

1 排尿後の不快感ゼロ！

排尿後の温感や冷感、かゆみがほとんどありません。また、長時間の密着による蒸れ、ベルト等の締め付けの物理的ストレスが無く、装着していることさえ忘れてしまうほどの心地良さ。もちろん皮膚トラブルも極めて微小。

2 経済的負担を大幅軽減！

洗浄して何度もご使用いただけますので、恒常的に必要となる消耗品の経済的負担やゴミ処分の問題、悩みからも開放されます。

3 介護者の負担を軽減！

排尿後はボトルをズボンのすそからワンタッチで外して尿を捨てるだけ。洗浄はボトルに市販の洗浄液を入れ、軽く握るだけで内部全体を洗えるので、手間がかかりません。

4 独創的なアイデアと工夫がいっぱいのまごころ設計！



ペニスに優しい
柔らかいシリコン材で、装着感と通気性を極めた二重カップ構造のレシーバ部分。



安心の二重チューブと逆流防止構造
チューブとノズルは特殊な設計の二重構造。万一器具を倒しても尿が逆流しにくい安心設計。



取り扱いが簡単
シンプルな一体構造なので誰でも簡単に使えます。洗浄時も、収尿タンクをワンタッチで脱着できます。

収尿ボトルは
250ml と 350ml の
2 個セットです

ズボンの外から目立ちにくい、軽量小型の専用収尿ボトルです。



軽くてやわらかくコンパクトです！

小さく丸められ、バッグやポーチに入れて持ち歩けます。必要な時に、サッと使えます。



身長に応じた 3 種類の
チューブ丈があります

〈サイズの目安〉

S サイズ

- ・股下 ～72cm まで
- ・目安身長 ～160cm まで
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時／55cm
350ml ボトル装着時／56,5cm

M サイズ

- ・股下 73～76cm
- ・目安身長 160～170cm
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時／60cm
350ml ボトル装着時／61,5cm

L サイズ

- ・股下 77cm ～
- ・目安身長 170cm ～
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時／65cm
350ml ボトル装着時／66,5cm



さらに使いやすく
用途に合わせて選べるオプション

専用ガーター



腰ベルトが 4 方向の吊り下げ式で、安定感抜群です



専用サポーター



日常の動きや軽い運動でも重さを感じさせない装着感

収尿ボトル 〈600ml〉



大容量で長時間の遠出も安心

こんなシーンで役に立つ、心強い便利な味方！



ショッピング



ウォーキング



バス、電車、車



行楽、レジャー

Mr. ユリナー は、洗浄して繰り返し使えます

※ 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

パソコンで

Mr. ユリナー

検索



<http://www.asahi-sg.co.jp>

外出をもっと気軽に楽しむために!



ズボンの中に、こっそりトイレ!

ご自身の能力を活かしたアクティブライフを!

医療・介護の現場だけでなく、様々なシーンでお使いいただけます

夜間、トイレに
向かう途中で漏れてしまうし、
転倒による骨折も心配で困っていた。
これはありがたい。(80代男性)

トイレの場所ばかり
気になるので、なるべく出掛けないように
していた。これは携帯して出掛けられる
ので、助かる。周りに判らないのも
うれしい。(80代男性)

80代の父親の世話で
気分転換のために、よくドライブに
連れて行くのだが、ひんぱんにトイレが
必要なので、ドライブコースをトイレの所在
と移動時間を事前にチェックして出掛けて
いた。これを使うと少々遠出も気軽に
出来るので助かる。(60代男性)

トイレ介助が必要な主人を
家において2時間以上の買い物に行けな
かったが、これを使うようになって、
助かった。(60代女性)

外出中はパッドを使用して
いたが、パッドは気持ち悪いので、
これに換えた。(60代男性)

パッドが嫌い
これまで装着型収尿器を使用していたが、
装着具合が悪く、もっと良い別の商品を探していた。今までに無い発想で
これは便利だ。(50代男性)

ゴミが出ないので外出の時に
とても便利だ。旅行が好きなのでとても
助かる。今までありそうでなかった
商品だ重宝している。(70代男性)

バス旅行に 仲間で出掛けるが、
トイレが近くなるので、バス車内でも
好きなビールを飲まずに我慢していた。
これを持っていると安心してビールが飲める。
付けていることが周りに判らないのも良い。
バス旅行には欠かせない。(70代男性)

前立腺手術を数年前に受けた。
その影響で、一時期紙おむつで過ごしたが、
非常に気持ち悪かった。二度と紙オムツは
したくない。これなら快適で
素晴らしい。(70代男性)

高所作業の仕事(鉄塔)をしている。
紙おむつで対処していたが、気持ちが悪かった。
これにしてから本当にありがたい。
快適だ。(50代男性)

★排泄の自立を応援する★
ミスター
Mr. ユリナー
特許第4758516号／意匠登録出願済

装着簡単！ 経済的！
「こんな便利な収尿器を待っていた！」

Mr. ユリナーは
立位と座位でご使用
できます



[Q] **カップ(レシーバー部分)が大きすぎませんか？**
通気性を考慮し、ゆとりを持たせた構造となっております。

[Q] **クリップの取付位置は？**
下着、ズボン、上着(肌着)など、ご使用の状況に合わせてお好きな位置にとめてください。

[Q] **クリップだけで落下しませんか？**
衣服をしっかり挟む構造で強力に挟み、
クリップ以外にもレシーバーは
下着などで支えられるため、落下するこ
とはまずありません。
心配な場合は、専用
のガーターやサポ
ーター(オプション)
をお使い頂くと安心
です。



[Q] **洗浄の頻度はどれくらいですか？**
不衛生は感染症のリスクが高まるため、外出先では排尿の
都度等、こまめに洗浄いただくことをお勧めいたします。

[Q] **通気穴を通して臭いが上がってきませんか？**
臭いが上がりにくい設計になっており、上がってくることは殆ど
ありません。それでも臭いが気になる場合、排尿後は早めに尿
を捨てて頂き、都度水洗いして下さい。ただ洗浄しないで何日
も放置した場合は例外です。

[Q] **SMLサイズとは？**
身長(股下)に応じて、チューブの長さが異なります。
選択の目安 S:股下:72cm まで(目安身長 160cm まで)
M:股下:73 ~ 76cm(目安身長 160cm ~ 170cm)
L:股下:77cm ~ (目安身長 170cm ~)

[Q] **交換の目安は？**
チューブの硬化・劣化が交換の目安です。劣化は漏れの原因とな
ります。小まめに洗浄、清潔を保つことで長くご使用いただけます。